



LILJENBERG CARE AB

Liljenberg Care AB säljer en rad olika mycket prisvärda mjukfiber madrasser i olika modeller. Madrasserna har gemensamt att de fördelar trycket på en större yta och bäddar in hälar, svanskota, skulderblad etc. som ofta är utsatta för högt tryck. (Se även produktblad Liljenbergmadrassen och hälskydd).

PRODUKTBLAD: Liljenberg 3-delad

Liljenberg 3-delad madrass



Produktinformation

Längd: 200 cm

Bredd: 80, 90, 105 och 120 cm

Vikt: 4,8 kg

Färg: benvit

Best. nr. 80 cm bred 113080

90 cm bred 113090

105 cm bred 113105

120 cm bred 113120

Tvättanvisning

Fördelen med denna madrass är att delarna kan tvättas separat i vanlig tvättmaskin, vilket gör den lämplig för småskalig sjukvård.

Normaltvätt: tvätta i 60°.

Vid infektionsrisk/hård nedsmutsning:

tvätta i 70°, minst 10 min.

Torktumlas: max 80°. Tag ut madrassen när den är "stryktorr". Det är speciellt viktigt att den inte torktumlas i för höga temperaturer!

Beskrivning:

Madrassen består av tre mjukfiberdelar som ligger i ett sammanhängande madrassfodral med fickor. Detta gör att man inte behöver tvätta hela madrassen.

Utsatta kroppsdelar bäddas in och de glatta fibrerna motverkar skjuvning som sker i madrassen istället för i patientens egen vävnad. Madrassen passar även för lite tyngre brukare. Den är även mycket uppskattad av brukare som har värk och smärta som vid fibromyalgi och reumatism.

Hantering:

Liljenberg 3-delad madrass lägges på en vanlig madrass. Fästes på underliggande madrass med resårbanden i hörnen. Bädda med lakan, samt vid behov inkontinensskydd eller hygienunderlägg. Undvik att lägga på ytterligare material (fårskinn etc)

Brandsäkerhetskrav:

Liljenberg 3-delad madrass uppfyller de användningskrav som ställs på vårbädden (NT FIRE 037).

Ofarlig ur miljösynpunkt att destruera exempelvis genom förbränning.

uppdaterad: 2010-04-19

Liljenberg Care AB, Östanväg 43, 216 19 Malmö

040-49 64 70, fax 040-49 39 02

e-post: info@liljenbergcare.se, hemsida: www.liljenbergcare.se