



LILJENBERG CARE AB

Liljenberg Care AB säljer en rad olika mycket prisvärda mjukfibern madrasser i olika modeller. Madrasserna har gemensamt att de fördelar trycket på en större yta och bäddar in hälar, svanskota, skulderblad etc. som ofta är utsatta för högt tryck. (Se även produktblad 3-delad madrass och hälskydd)

PRODUKTBLAD: Liljenbergmadrassen

Liljenbergmadrassen



Produktinformation

Längd: 200 cm

Bredd: 80 cm, 90 cm, 105 cm och 120 cm

Vikt: 3,2 kg (90cm bred)

Färg: benvit

För att enkelt veta vilket år madrassen är tillverkad har kantbandet tilldelats olika årsfärger

Tvättanvisning:

Normalfall: tvätta i 60°.

Vid infektionsrisk/hård nedsmutsning: tvätta i 70°, minst 10 min.

Torktumlas: max 80°. Tag ut madrassen när den är "stryktorr". Det är speciellt viktigt att den inte torktumlas i för höga temperaturer!

Tvätteriet Berendsen i Eskilstuna som bl.a. tvättar åt Stockholms kommun har provtvättat madrassen med fullt godkänt resultat.

Inom hemsjukvård där rekonditionering kan vara kostsam kan madrassen pga. sitt låga pris med fördel användas till en brukare.

Beskrivning

Liljenbergmadrassen är speciellt lämplig för tunna och magra brukare. Utsatta kroppsdelar bäddas in och madrassen ersätter därmed brukarens " eget hull". De glatta (silikoniserade) hålfibrerna motverkar skjuvning. Denna sker i madrassen istället för i brukarens egen vävnad. Bäddflikarna på sidorna gör att den ligger stadigt i sängen. Den är även mycket uppskattad vid värk och smärta som vid fibromyalgi och reumatism. För tunga och orörliga brukare rekommenderar vi Liljenberg 3-delad madrass.

Hantering

Liljenbergmadrassen lägges på en vanlig madrass, fästes på den med resårbanden i hörnen och bäddflikarna på sidorna vikes under.

Bädda med ett lakan, hygienunderlägg, eller inkontinensskydd vid behov. Undvik att lägga på ytterligare material (fårskinn etc.)

Brandsäkerhetskrav

Liljenbergmadrassen uppfyller de användningskrav som ställs på vårbädden (NT FIRE 037).

Ofarlig ur miljösynpunkt att destruera genom förbränning.

uppdaterad: 2009-11-11

Liljenberg Care AB, Östanväg 43, 216 19 Malmö ☐

040-49 64 70, fax 040-49 39 02

e-post: info@liljenbergcare.se, hemsida: www.liljenbergcare.se